

## VISUALIZACIÓN DE CASOS EN LA PLATAFORMA RealAligner

## **ACCESO PORTAL WEB**

Paso 1. Entrar en la web www.realaligner.com en la parte de Profesional.

Paso 2. Una vez dentro, se deberá pinchar en el botón Portal.

Paso 3. Dicho botón llevará a la pantalla de login, donde se deberá introducir el correo electrónico y contraseña con los que el usuario se haya dado de alta.




- **Paso 4.** Entrar en la sección **área de cliente,** donde se accederá a las distintas opciones que ofrece la plataforma.
- Paso 5. Acceder a la parte de Tus casos clínicos.
- Dentro de dicha sección, la plataforma muestra un listado de casos clínicos, segmentados por número de caso, fecha, datos del doctor, datos de la clínica y el estado en el que se encuentra.
- Al seleccionar cualquier de los casos del listado, se podrá acceder a toda la información sobre en qué fase del proceso se encuentra el caso y en qué fecha fue el último reporte que se produjo
- Los cambios de fase se producen a medida que la información es cargada en el sistema, por ejemplo, una vez recibidos los registros y comprobados su correcto formato, pasan automáticamente al estado Planificación.
- Todos estos cambios son comunicados al usuario mediante correos electrónicos, para que esté informado en todo momento de en qué etapa se encuentra su caso.
- Paso 6. Visualiza tu planificación, dentro de la sección Casos Clínicos opción de visualizar toda la información sobre el plan de tratamiento propuesto: medidas, ataches y la animación del caso para poder mostrar al paciente el plan de tratamiento diseñado para él.










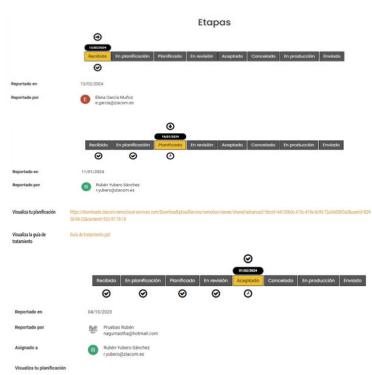

Paso 7. Guía de tratamiento, la sección donde estará disponible toda la información clínica del caso, incluyendo IPR propuesta, elementos accesorios, medidas y recomendaciones clínicas.



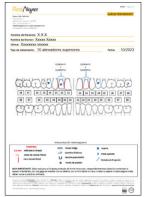

Paso 8. Decisión final. Una vez se ha revisado el caso el usuario tendrá distintas opciones de elección dependiendo de la decisión tomada.



 En caso de petición de revisión del caso, la plataforma pone a disposición del usuario la opción de especificar el motivo de la revisión y, mediante un texto libre, explicar los cambios que se deben tener en cuenta para la replanificación.




 En el caso de aceptación del caso, automáticamente el sistema cambiará de etapa y el equipo de RealAligner recibirá la confirmación para comenzar con el proceso de producción.



 - Una vez recibida la orden, se iniciará el proceso de fabricación de los alineadores. El usuario tendrá la posibilidad de seguir todo el proceso desde su sección etapas y será informado puntualmente de cualquier novedad de su caso.



 El usuario dispone de un apartado de comunicación directa con el equipo de RealAligner mediante el cual podrá trasladar por escrito cualquier duda o consulta acerca de su caso, dichas consultas serán respondidas por el equipo de RealAligner a la mayor brevedad.

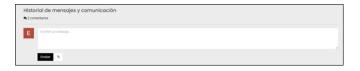

Bienvenid@ a la ¡Revolución de las sonrisas!

