

# *Real*Aligner


**CONSIGLI PER L'USO  
E  
MANTENIMENTO**



## COSA SONO GLI ALLINEATORI?

*RealAligner* è un sistema di allineatori appositamente progettato per correggere gradualmente il morso.

Utilizzando progressivamente una serie di dispositivi di correzione in plastica, i tuoi denti inizieranno a muoversi gradualmente secondo il piano di trattamento personalizzato realizzato dal tuo dentista e dagli specialisti di *RealAligner* sulla base dello studio ortodontico preliminare.

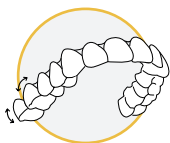

Ogni allineatore sposta i tuoi denti progressivamente, muovendoli orizzontalmente, verticalmente e persino girandoli, se necessario.

Ogni volta che passi a una nuova fase del trattamento (di solito ogni due settimane), noterai come i tuoi denti si muovano progressivamente seguendo il tuo piano di trattamento personalizzato.



## USO DEGLI ALLINEATORI

Gli allineatori *RealAligner* devono essere utilizzati per almeno 22 ore al giorno, rimuovendoli solo per mangiare.



Il tuo dentista ti indicherà quando passare a un nuovo allineatore. L'intervallo di tempo normale è di circa 15 giorni.



## PRIMO UTILIZZO

Questo prodotto è stato sottoposto a un processo di igienizzazione, ma non è sterile né disinfettato, pertanto, prima di utilizzarlo, è necessario seguire le seguenti istruzioni di pulizia:

- Lavati accuratamente le mani con acqua e sapone prima di maneggiare gli allineatori.
- Dopo averli estratti dalla busta e prima di inserirli in bocca, sciacquali e puliscili con acqua e sapone.



- Dopo averli rimossi e dopo ogni utilizzo, è importante pulirli in modo preciso e accurato, compresi i bordi e le parti esterne e interne. È necessario prestare particolare attenzione alla zona del palato e del bordo dei denti, in quanto sono le aree in cui si forma la maggior parte del biofilm.
- Gli allineatori devono essere sempre sciacquati e asciugati prima di riporli nella custodia di protezione.



## ALIMENTAZIONE DURANTE IL TRATTAMENTO

Rimuovi gli allineatori ogni volta che mangi o bevi qualsiasi cosa diversa dall'acqua. Le bevande calde possono deformare l'allineatore e le bevande zuccherate e colorate possono macchiarlo.

Non dovresti fumare mentre indossi gli allineatori, in quanto potrebbero ingiallire e macchiarsi.



Non è nemmeno consigliabile masticare gomme con gli allineatori in bocca, in quanto potrebbero attaccarsi.




## INSERIMENTO DEGLI ALLINEATORI

Ti consigliamo di sciacquare gli allineatori con acqua ogni volta li rimuovi o prima di inserirli.




L'inserimento deve avvenire sui denti anteriori, premendo con le dita per adattarli correttamente, senza mai mordere con i denti, in quanto potrebbero rompersi.

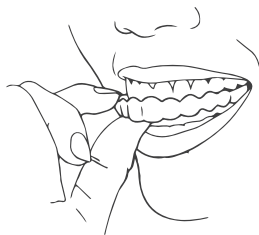

## DISPOSITIVI MORSETTO

Nei primi giorni di utilizzo di ogni allineatore, è consigliabile utilizzare i morsetti inclusi nel kit di partenza per favorire un corretto adattamento. I morsetti devono essere utilizzati sempre con entrambi gli allineatori in bocca (superiore e inferiore) e seguendo le indicazioni dell'ortodontista.

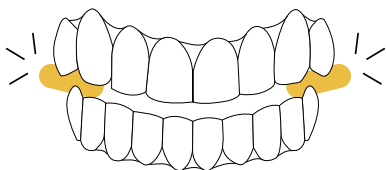

## COME PULIRE GLI ALLINEATORI

Per mantenere gli allineatori in perfette condizioni, è consigliabile pulire la superficie della mascherina con uno spazzolino, acqua tiepida e sapone non appena la si rimuove per mangiare.

Non è consigliabile pulirla con dentifricio, collutorio o prodotti chimici, in quanto potrebbero dare colori e sapori indesiderati.

È inoltre consigliabile utilizzare compresse per la pulizia delle protesi rimovibili una o due volte a settimana.





[realaligner.com](https://realaligner.com)




## RIMOZIONE

Per rimuovere l'allineatore, afferralo nella parte posteriore, quella che copre i molari, da un solo lato o da entrambi contemporaneamente. Puoi muoverlo leggermente da un lato all'altro mentre lo tiri via.

Se non riesci a rimuoverlo con le mani, nel kit di avvio troverai uno strumento speciale per la rimozione che può aiutarti.


Una volta rimosso, sciacqualo con abbondante acqua e riponilo nella sua custodia.

Non esporlo a calore e non riporlo sotto oggetti pesanti che potrebbero deformarlo.

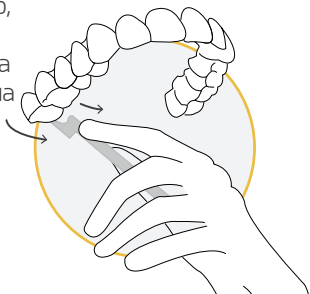

## DISAGI DURANTE IL TRATTAMENTO


È normale avvertire fastidi e un po' di dolore all'inizio del trattamento, sia sui denti che sulle gengive, ma se il dolore è intenso e persistente, è consigliabile parlarne con il proprio dentista.

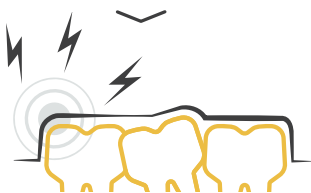

## PROGRESSIONE DEL TRATTAMENTO

Alla fine del trattamento, una volta utilizzati tutti gli allineatori, potrebbe essere necessaria una seconda fase di rifinitura per ottenere l'allineamento perfetto dei denti.

### Trattamento

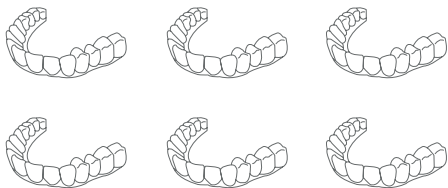


### Rifinitura



## BUSTE NUMERATE

Riponi gli allineatori già utilizzati nella loro scheda numerata in modo che, in caso di smarrimento, rottura o inserimento errato, tu possa utilizzare l'allineatore precedente e mantenere così la posizione dei denti fino al prossimo appuntamento con il dentista.

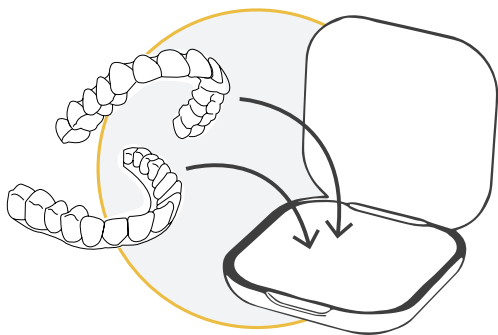

# RealAligner

[www.realaligner.com](http://www.realaligner.com)

**Produttore:**

---

*RealAligner*

Ziacor CAD-CAM SL

Calle Búhos, 2

28320 Pinto - Madrid - SPAGNA

Tel.: +34 91028 09 27

[info@realaligner.com](mailto:info@realaligner.com)

ITALIANO | IT  
Rev-03